


Kit de Prueba Rápida de Antígeno de SARS-CoV-2

(Inmunocromatografía de Oro Coloidal)

CE

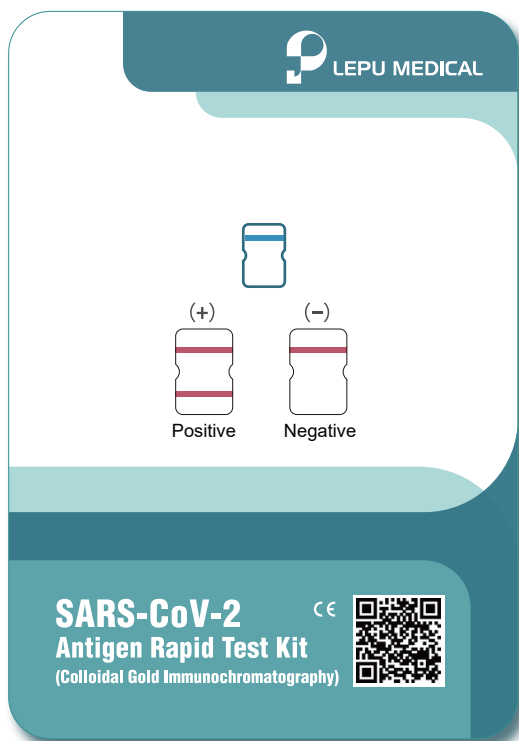

- ① No invasivo
- ② Fácil de usar
- ③ Práctico, no se requieren dispositivos
- ④ Rápido, obtenga resultados en 15 minutos
- ⑤ Estable, con alta precisión
- ⑥ Económico, rentable



Hospital



Sitio de prueba



Aeropuerto



Estación



Hotel




Corporación




Proyección
masiva




Método de prueba

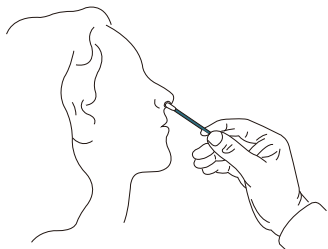


Step 1: Use un hisopo para recolectar la muestra.

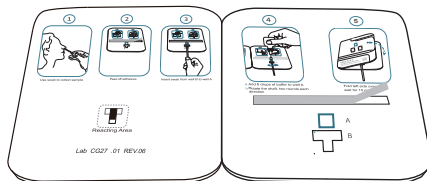


Step 2: Retire la cubierta protectora del pegamento de fijación.

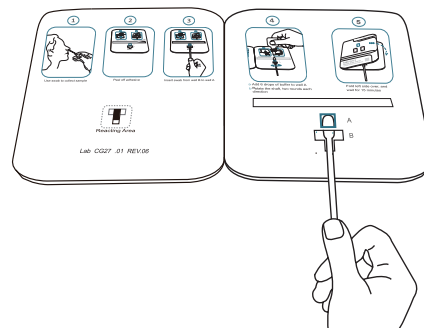

Step 3: Pase la muestra de hisopado a través del fondo del pocillo B en el pocillo A.

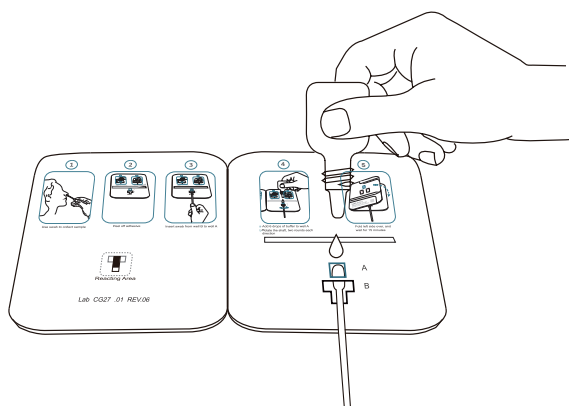

Step 4: Agregue 6 gotas de tampón al pocillo A. Gire el hisopo en sentido horario y antihorario y realice el proceso dos veces en la solución de procesamiento de muestras.

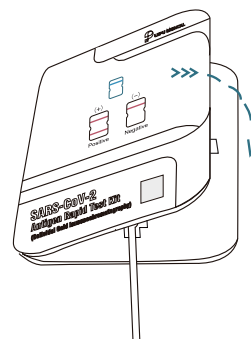


Step 5: Pegue los lados izquierdo y derecho juntos. El resultado de la prueba se mostrará después de 15 minutos.



Explicación de los resultados de la prueba


Positivo

(+)

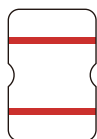


Negativo

(-)

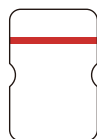

Inválido

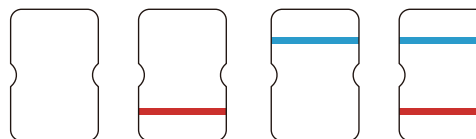

BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Domicilio: Edificio 7-1 N.º 37, Calle de Chaoqian, Distrito de Changping, Beijing, 102200, República Popular China

Tel: +86-10-8012 3964

Email: lepuservice@lepumedical.com

Web: en.lepumedical.com